

GEBRUIKSAANWIJZING

Biodent TS

PLANTAARDIG TANDVERNIS

TIJDELIJKE DENTAL SEALANT OP
BASIS VAN PLANTAARDIGE HARS



Gebruik Biodent TS bij een hoger risico op cariës: bij frequent suikergebruik en als u in de afgelopen twee jaar nog een gaatje had. Gebruik Biodent TS om de kans op gingivitis te verminderen.

1 keer per week toepassen, voor maximaal vier weken.

Biodent BV

Mollebite 19 • 6931 KE Westervoort • Nederland

www.biodent.nl • info@biodent.nl

VOORBEREIDEN

- Draai de afsluitcap van het spuitje.
- Schroef de meegeleverde tip op het spuitje.



Breng aan op tandhalzen



Breng aan op kauwvlakken



Breng aan tussen tanden, flossen

AANBRENGEN

- Op tandoppervlak vrij van tandplak en etensresten.
- Op tandoppervlak waar tandplaque moeilijk te verwijderen is met tandenpoetsen.



Eet en drink 5 minuten niet. Poets daarna de tanden, spuug kleine stukjes uit. Poets voorzichtig, beschadig het tandvlees niet. De zichtbare vernis die niet weggepoetst kan worden lost in een paar uur op.

AFSLUITEN

Draai na het aanbrengen het tipje van het spuitje van het spuitje af met de afsluitcap. Een onzichtbare hoeveelheid vernis blijft zeker een week achter in de poriën van het tandoppervlak en heeft een antibacteriële werking.